


BREVI ISTRUZIONI POMPA SIRINGA BRAUN

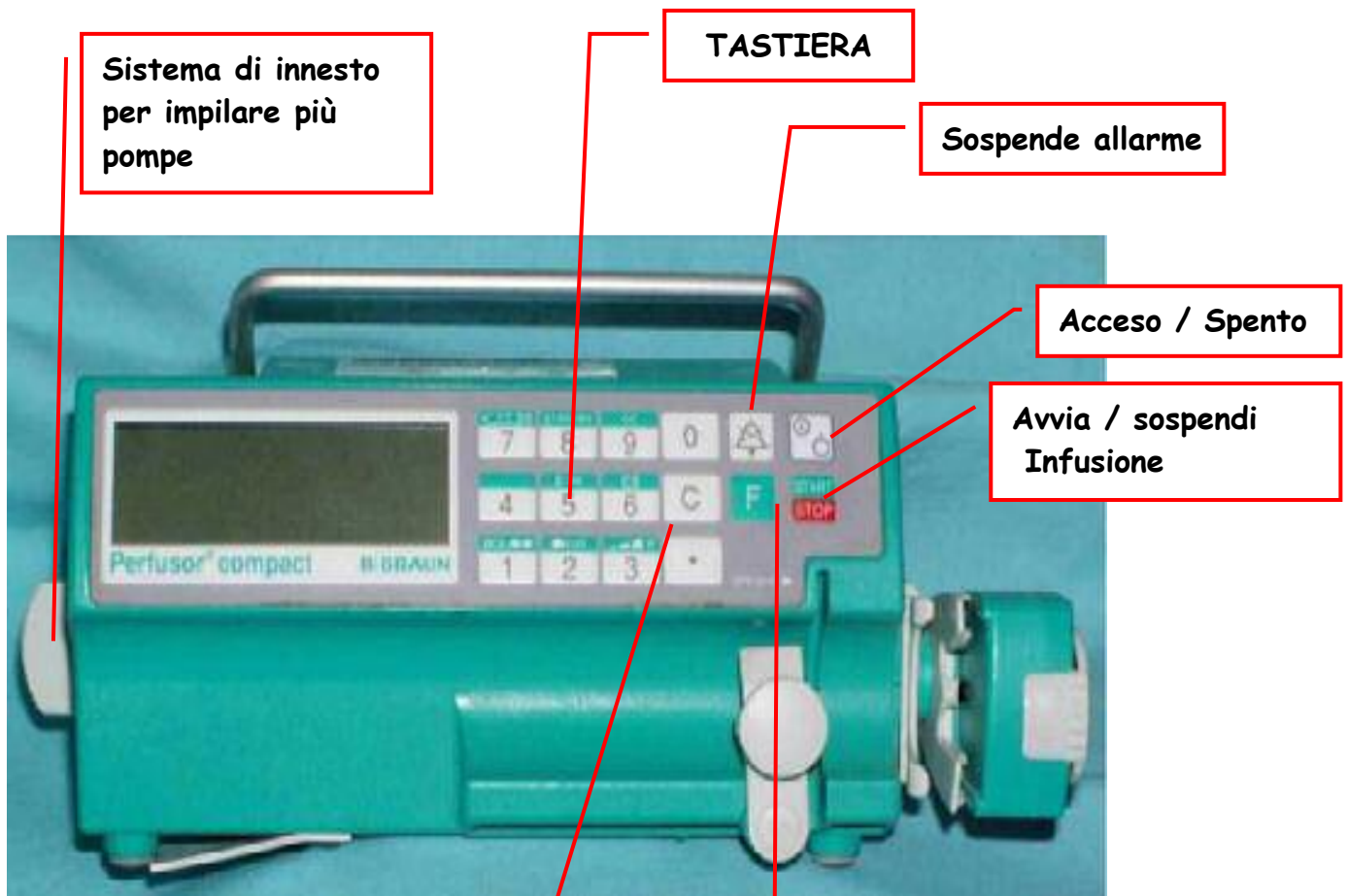

Tasto C: per cancellare oppure variare la velocità di infusione senza sospendere la stessa

Tasto FUNZIONE

Per confermare o attivare modalità

F + 1= mantenuto premuto eroga un bolo di infusione determinato dall'operatore (sul display sono indicati i cc infusi)

F + 2= imposta flush iniziale

F + 3= sensibilità sulla linea di infusione (da 1 a 3)

F + 5= indica i volumi infusi; è opportuno azzerare il valore (premendo C) al cambio di siringa;

F + 6= stato della batteria

F + 7= modello siringa in uso

F + 8= stato di stand by (attesa). La pompa è ferma ma ancora impostata

F + 9= per collegamento a centralina computerizzata